





飛沫感染予防

# デノロ・フェイスシールド

\* ER・ICU・オペ室・プロフェッショナル仕様

\* 日本国内・素材メーカー開発製造 \* シールド取替式

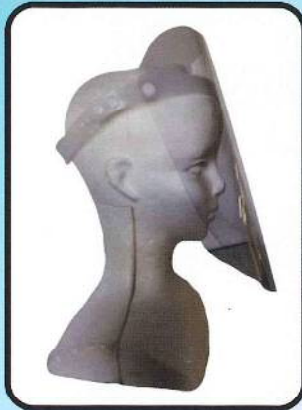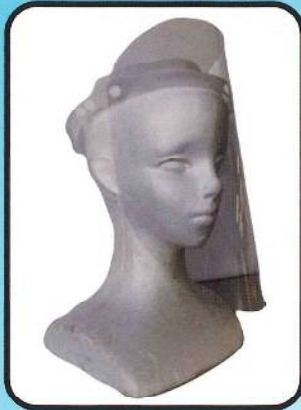

- 1、シールドは取り換え簡単。交換式なのでいつでも清潔。
- 2、シールド部分は耐薬品性・耐水性が高いPETシートを使用。
- 3、軽量タイプなので長時間使用可能。装着感・耐久性も◎
- 4、バンド部分は防水性が高いポリエチレンを採用し様々な環境にも対応。
- 5、軽量かつシンプルなデザインで男女兼用。
- 6、頭の大きさに合わせてサイズを7段階に調整可能。
- 7、国内のプラスチック製造メーカーによる制作で安心。  
また洗浄消毒して再利用も可能。

1箱：バンド20本・シールド40枚入り 17,000円(税別)



■医療の現場で

■受付での対応時で

■接客業の現場で


眼鏡やゴーグルの上からも装着可能

軽量かつシンプルなデザインで男女兼用です。  
頭の大きさに合わせてサイズを7段階に調整可能です。



耐薬品性・耐水性が高い素材を使用

シールド部分は耐薬品性・耐水性が高いPETシートを、  
バンド部分は防水性が高いポリエチレンを採用し、  
様々な環境にも対応できる仕様となっています。

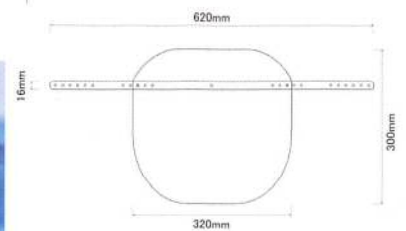

製品仕様

品名	デノロ・フェイスシールド
素材	シールド(PET)、バンド(ポリエチレン)
梱包内容	シールド(40枚)、バンド(20本) 取付リベット(180個+予備20個)

日本製

飛沫感染予防対策用

## デノロ・フェイスシールド

医療施設はもちろん、理美容関係や飲食店など、  
様々なシーンにおいて、ウイルスなどの飛沫感染  
リスクから顔をしっかりガードします。


『販売代理店』

飛沫感染予防対策用  
取扱説明書


# デノロ・フェイスシールド

## 1set 内容

シールド (×1 枚)

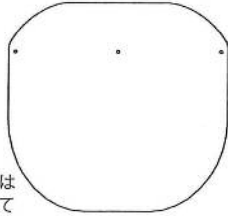

外周用バンド (×1 本)

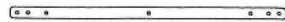

内周用バンド (×1 本)



スナップロック (×9 組)



+ 予備 1 組


※シールドは汚れた際には  
交換用に 1 枚付属されて  
いますので交換が可能です

<梱包内容>

- シールド：1 枚ずつビニール袋に收容され 40 袋
- 外(内)周用バンド：各 20 本ビニール袋收容
- スナップロック：予備を含め 10 個ずつビニール袋收容され 20 袋

### 【手順①】

シールドに外周用バンドを矢印 3ヶ所へ  
スナップロックで取付ける

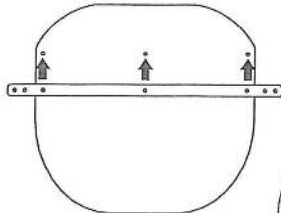


※スナップロックはカチッと音が  
するまで押し込んでください



### 【手順②】



内周用バンドを図のように重ねる

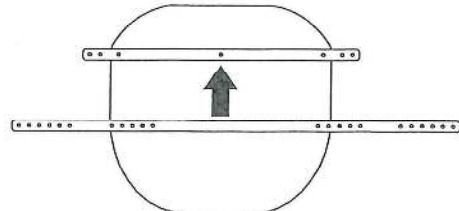

※バンドはなるべく中心に合わせてください

### 【手順③】


おでこにあてがい、シールドと顔の距離 (図 A)  
を調整しながら、矢印の位置 4ヶ所へスナップ  
ロックで取付ける

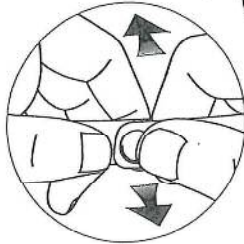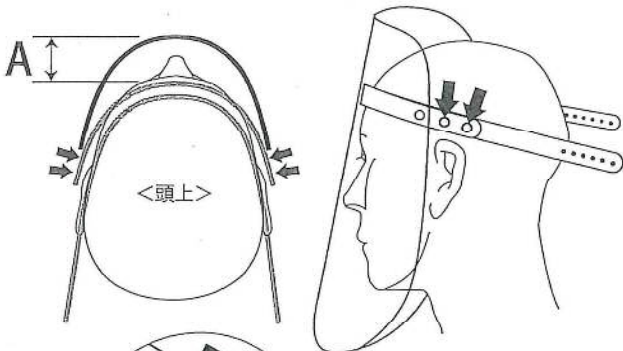

※取り付けしたスナップロックは  
図のように指で押えながら  
バンドと一緒に引き抜くと  
外しやすいです

### 【手順④】

後頭部で頭のサイズにあわせ、合う穴位置  
2ヶ所にスナップロックで取付け完成

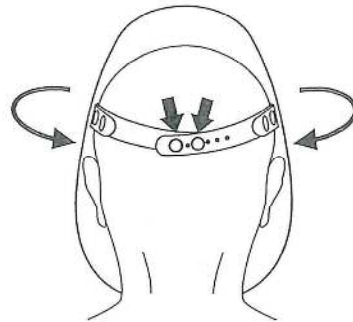

※1人で取付けが難しい場合は 2人でおこなってください

### ⚠ ご注意

※誤ってスナップロックのみで閉じて  
しまった場合は、ケガに注意しながら  
マイナスドライバーなどではずして  
ご利用ください



### <その他の注意事項>

- \*素材は透明樹脂となりますので、とがったもので表面を当てるとキズが残る事があります。
- \*製品に強い力を加えると、割れるなど破損する場合があります。
- \*温度環境で若干の変形を起す場合があります。
- \*万が一、製品などでケガをされた場合でも責任は一切負いません。
- \*こちらの製品は予防のため、感染された場合でも責任は一切負いません。

### <お問い合わせ>

**deno** フジデノロ株式会社

【本 社】〒485-0053 愛知県小牧市多気南町 361 番地 1  
TEL 0568-73-7575 FAX 0568-73-7795  
【東京支店】〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-7-11  
アクシス五反田ビル 4F  
TEL 03-5719-3009 FAX 03-5719-3389